



## FiltaNeb™

Kit de mascarilla de adulto EcoLite™ no ventilada, con nebulizador Cirrus™2, filtro y línea de oxígeno.



**Oxígeno y Aerosolterapia** ▪ Terapia de Nebulización

Con el fin de satisfacer los requisitos cambiantes del mercado sanitario mundial, Intersurgical ha desarrollado un nuevo producto que permite reducir drásticamente el porcentaje de partículas emitidas al medio ambiente durante las terapias con aerosoles. El producto incluye una mascarilla no ventilada basada en la mascarilla EcoLite de Intersurgical, con un filtro en la vía exhalatoria. El sello de la mascarilla es de color verde oscuro para distinguir esta mascarilla sin orificios de ventilación de las mascarillas para nebulización estándar. Para garantizar el mejor ajuste posible, el kit de la mascarilla incluye una cinta elástica adicional que se coloca sobre la cabeza.

El nebulizador Cirrus2 incorpora una serie de beneficios, entre los que se incluye una cubeta graduada para una sencilla visualización del volumen de fármaco que hay en el nebulizador. El nebulizador dispone de un sistema de apertura rápida que permite conectar y desconectar la cubeta con un sencillo movimiento de giro. Esto acelera el proceso de llenado y proporciona un sellado más fiable entre la tapa y la cubeta del nebulizador.

El nebulizador Cirrus2 está diseñado para suministrar fármacos para su depósito traqueobronquial.

El sistema proporciona una reducción de más del 95% de las partículas emitidas al medio ambiente, ayudando a minimizar la diseminación de los gases exhalados potencialmente infecciosos y las emisiones de fármacos que se liberan durante la terapia de nebulización. Se reduce así el riesgo de exposición para los profesionales sanitarios.

**Sistema de ajuste nasal integrado**

Se adapta a diferentes anatomías faciales, y está diseñado para reducir el riesgo de que el medicamento aerosolizado llegue a los ojos del paciente

**Filtro de exhalación**

Reduce la emisión de partículas al medio ambiente durante la terapia de nebulización

**Cubeta graduada**

Facilita y agiliza la preparación

**Doble cinta elástica de sujeción**

Asegura un perfecto sellado entre la mascarilla y la cara del paciente

**Reborde facial siliconado**

Incrementa la comodidad del paciente

**Sello de la mascarilla verde oscuro**

Permite distinguir la mascarilla no ventilada de las mascarillas de aerosol estándar

**Colocación por encima o por debajo de la barbilla**

Permite un mejor ajuste en un mayor rango de anatomías faciales

**Sistema de apertura rápida**

Sencilla conexión y desconexión



Referencia	Descripción	Longitud de la línea de oxígeno	Uds/caja
1453044	Kit de mascarilla de adulto EcoLite™ no ventilada, con nebulizador Cirrus™2, filtro y línea de oxígeno.	2.1m	12

Producto de bajo impacto ambiental

IS10.39 ES • Issue 5 12.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

**Por favor, piénselo antes de imprimir.**  
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.