



i-gel[®]
PLUS

i-gel[®] ha evolucionado

Kit Control de Vía Aérea



Gestión de vías aéreas ▪ Dispositivos para vías aéreas



Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus

En anestesia y urgencias, se necesitan dispositivos que sean fáciles, rápidos y fiables de utilizar. El Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus contiene todo lo necesario para preparar, insertar y asegurar i-gel® Plus de manera rápida y eficiente. Esto significa que no es necesario desinflar la almohadilla antes de la inserción ni inflarla después de la colocación para garantizar el sellado, por lo que el procedimiento de preparación e inserción es más corto y sencillo.

i-gel® Plus - Características mejoradas


El Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus supone un avance con respecto al Kit Control de Vía Aérea i-gel® O₂, ya que incorpora el dispositivo más avanzado, i-gel® Plus, con las siguientes mejoras en el producto.

Canal gástrico de mayor diámetro para mejorar la seguridad del paciente

El diámetro del canal gástrico se ha incrementado para optimizar el manejo del contenido estomacal, permitiendo así la inserción de una sonda de aspiración más grande, ayudando a reducir el riesgo de aspiración y aumentando la seguridad del paciente.

En la siguiente tabla se muestra el tamaño máximo de sonda de aspiración que puede pasarse a través del canal gástrico para cada tamaño de i-gel® Plus en comparación con i-gel® estándar.

Tamaño del dispositivo	i-gel® estándar	i-gel® Plus
3	12FG	16FG
4	12FG	18FG
5	14FG	18FG

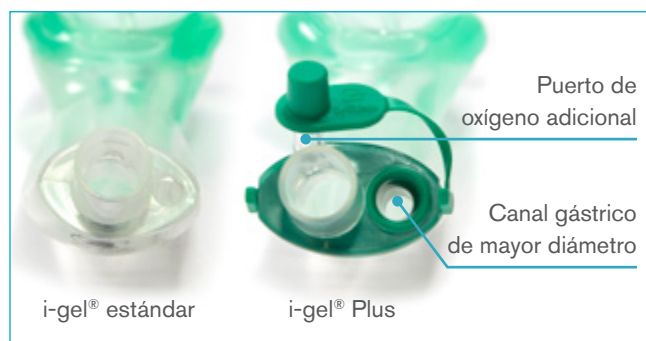


Inserción

i-gel® Plus es increíblemente fácil de usar. Su simplicidad hace que la técnica de inserción sea intuitiva y fiable, y no requiere ni se beneficia de la inserción de los dedos o pulgares en la boca del paciente. i-gel® Plus está diseñada para facilitar la ventilación como parte de los protocolos de resucitación estándar, como los establecidos por el Consejo Europeo de Reanimación (ERC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA).

Además, i-gel® Plus incorpora un puerto de oxígeno adicional, por lo que también puede utilizarse para la administración de oxigenación pasiva como parte de un protocolo adecuado de Reanimación Cardiocerebral (RCC).


Nueva rampa de intubación para optimizar su uso como conducto de intubación

Se ha añadido en la salida del canal ventilatorio una rampa de intubación, que ayuda a que el tubo endotraqueal, cuando se usa i-gel® Plus como conducto de intubación (guiada con fibroscopio), salga en el ángulo adecuado para permitir un paso fiable y seguro a través de las cuerdas vocales y hacia la tráquea.

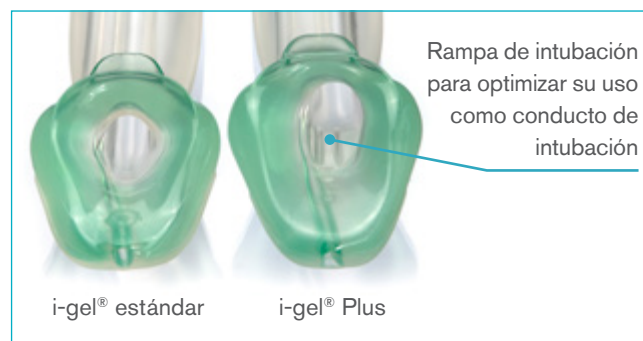

Punta de la almohadilla elongada para mejorar el sellado esofágico.

Se ha aumentado ligeramente la punta de la almohadilla de i-gel® Plus. Puede ayudar a mejorar el sellado esofágico, aportando presiones de sellado más altas y, en combinación con el canal gástrico más grande, reducir el riesgo de aspiración.

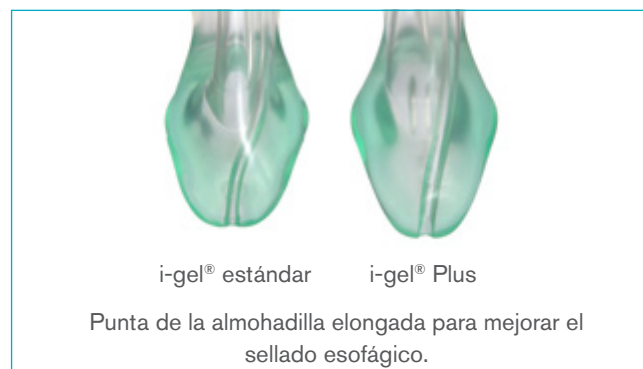



i-gel® Plus – Características y beneficios

Conector 15mm

Conexión segura para cualquier conexión paciente o conector estándar

Anillo de fijación con código de color

Para asegurar la posición de i-gel® Plus con la cinta de fijación

Extremo proximal del canal gástrico

Información del producto claramente visible

Para una clara referencia visual. Incluye información del tamaño y peso recomendado

Guía de posición

Canal gástrico de mayor diámetro

Permite la inserción una sonda de aspiración más grande

+ Mejora añadida i-gel® Plus

Rampa de intubación

Para optimizar su uso como conducto de intubación

+ Mejora añadida i-gel® Plus

Punta de la almohadilla elongada

Ayuda a mejorar el sellado esofágico

+ Mejora añadida i-gel® Plus

Puerto de oxígeno adicional

Para administración de oxigenación pasiva como componente del protocolo de resucitación cardiocerebral (CCR)

Canal gástrico

Mejora y aumenta la seguridad del paciente frente a regurgitación

Pieza integrada de mordida

Reduce la posibilidad de oclusión de la vía aérea

Estabilizador de la cavidad bucal

Facilita la inserción y elimina el riesgo de rotación

Retentor de la epiglotis

Reduce la posibilidad de repliegue de la epiglotis y de obstrucción de la vía aérea

Almohadilla no-inflable

Fabricada de un exclusivo material suave "tipo gel" que facilita la inserción y reduce el trauma

Extremo distal del canal gástrico



El Kit Control Vía Aérea i-gel® Plus está disponible en 3 tamaños para adultos e incluye:


- Cánula supraglótica i-gel® Plus
- Sobre de lubricante para una rápida y fácil lubricación de i-gel® Plus antes de su inserción
- Cinta de fijación que asegura la posición de i-gel® Plus
- Sonda de aspiración de 16 FG para su inserción a través del canal gástrico y vaciar el contenido estomacal

Innovación en vías aéreas desde 2007

La cánula supraglótica i-gel® original, lanzada en 2007, es un dispositivo supraglótico innovador de Intersurgical con almohadilla no-inflable. La cánula i-gel®, el primer gran avance desde la mascarilla laringea, cambió el concepto del manejo de la vía aérea y es ampliamente utilizada en anestesia y reanimación en todo el mundo. i-gel® toma el nombre del material suave "tipo gel" del que está fabricada. El uso de este innovador material ha permitido el desarrollo de una almohadilla no-inflable única. Esto significa que no necesario desinflar la almohadilla antes de la inserción ni inflarla después de la colocación para asegurar el sellado, lo que hace que la inserción de i-gel sea fácil, rápida y fiable en todas las circunstancias. El Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus es la última incorporación al rango i-gel®.

Fijación

El Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus incluye una cinta de fijación especialmente diseñada para asegurar la posición de i-gel® Plus. La fijación se consigue fácilmente deslizando la cinta por debajo el cuello del paciente y asegurándola en el anillo de fijación de i-gel® Plus. Esto lo convierte en una opción ideal para su uso en casos en los que la cinta adhesiva no es adecuada, como en pacientes con vello facial.

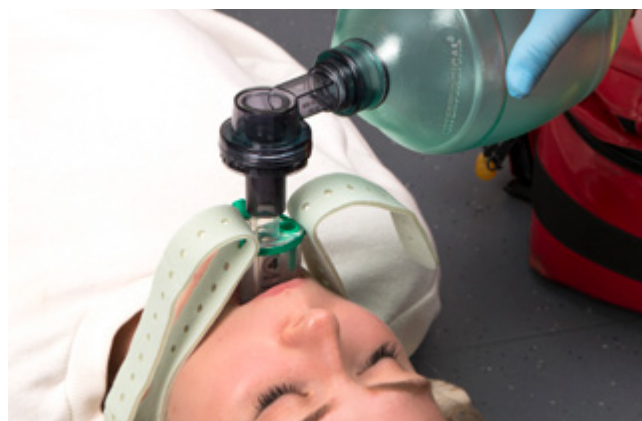

Información para pedidos

El Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus contiene una cánula supraglótica i-gel® Plus, un sobre de lubricante, una cinta de fijación y una sonda de aspiración, en un envase transparente, estéril y rígido. Este empaquetado único protege el dispositivo durante el transporte y el almacenamiento. i-gel® Plus tiene un anillo de fijación con código de color para permitir una rápida y fácil identificación del tamaño. El Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus está disponible en tres tamaños de adulto. El Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus se suministra en cajas de 6 unidades.



Referencia	Descripción	Color	Peso	Uds./caja
8805000	Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus - Incluye una i-gel® Plus tamaño 5 con anillo de fijación naranja, sobre de lubricante, cinta de fijación para las vías aéreas y una sonda de aspiración 16FG	●	90+ kg	6 
8804000	Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus - Incluye una i-gel® Plus tamaño 4 con anillo de fijación verde, sobre de lubricante, cinta de fijación para las vías aéreas y una sonda de aspiración 16FG	●	50-90 kg	6 
8803000	Kit Control de Vía Aérea i-gel® Plus - Incluye una i-gel® Plus tamaño 3 con anillo de fijación amarillo, sobre de lubricante, cinta de fijación para las vías aéreas y una sonda de aspiración 16FG	●	30-60 kg	6 

[Consúltenos](#)
[Más información](#)
 Estéril

Nota: la sonda de aspiración contiene PVC.

IS6.25 ES • Issue 1 09.25



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • India • Ireland • Italy
Japan • Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA